




EGYEDI TALPBETÉT KÉSZÍTÉS

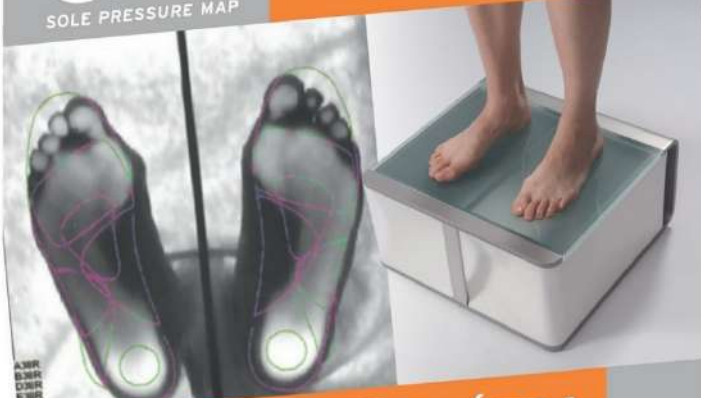

SPM SOLE PRESSURE MAP SZÁMÍTÓGÉPES TALPVIZSGÁLAT



EGÉSZSÉGPÉNZTÁRRÁ ELSZÁMOLHATÓ

Használati útmutató

Az SPM talpbetét orvostechnikai eszköz. A számítógépes (egyedi) méretvétel alapján rendelésre készült moduláris elemekből összeállított SPM talpbetét optimálisan biztosítja a lábon kialakult statikai elváltozások (lúdtalp, haránt- és bokasüllyedés) okozta panaszok kezelését. Cukorbetegséggel kezelt személyek részére külön betétet készítünk.

Használata:

A talpbetét bármilyen belső emelés nélküli – megfelelő bőségű, 2 - 5 cm sarokmagasságú – lábbelibe elhelyezhető. Ideális a zárt, kényelmi, utcai cipő vagy a sportcipő (kizárva a hegyes orrú, tűsarkú, kényelmetlen szűk vagy kis bőséggel rendelkező divatcipőket!) A betét annak vastagsága miatt elvesz a cipő bőségéből, ami normális jelenség. Használatához a cipőben lévő eredeti betétet ki kell venni és csak az egyedi betéttel kell hordani. A betét használata kivethető talpbetétes papucsban, szandálban is megoldható. Egyéb nyitott szandálban, papucsban a betétet ideiglenesen rögzíteni kell pl. mindkét oldalán tapadó ragasztószalaggal.

A betétet a cipő sarokrészébe ütközésig helyezzük be, és ezt a pozíciót viselés során is biztosítjuk. Ha a betét hossza nem egyezik meg a cipő hosszával, az elejéből ollóval hozzá lehet igazítani. Ügyeljünk az oldaliságra! (bal-jobb). Az igazítás során 1 cm-nél nagyobb részt ne vágjon le a betétből.

A betét kialakítása és anyaga kellemes komfortérzetet biztosít viselőjének. Ennek ellenére megtörténhet, hogy kezdetben kényelmetlennek tűnik, mivel a talpnyomás érzete és toleranciája egyénenként tág határok közt változhat. Célszerű fokozatosan hozzászoktatni a lábat az áthelyezett nyomáspontok okozta új érzethez. Először napi 5-10 majd 10-15, utána 30-60 percet ajánljuk használni. Ezt követően már megpróbálhatja egész nap viselni, ha nem érez különösebb kellemetlenséget viseléskor. Előfordulhat, hogy akár egy-két hét is szükséges a teljes alkalmazkodáshoz.

Az egészséges talpizomzat fenntartására ajánljuk, hogy fokozottan figyeljen, amelyet a talpbetétben alkalmazott modulok rugalmassága révén és a rendszeres talpizom tornával érhet el.

Tisztítás:

A nedvesség hatására a betét elszíneződhet. Az átnedvesedett betétet használaton kívül szükséges levegőztetni, kiszárítani. Tisztítása csak enyhén nedves ruhával történhet. Ne tisztítsa oly módon, hogy a betét teljesen átnedvesedjen.

Tisztítás után is alaposan szárítsa meg, de ne sugárzó hővel. (pl. ne kályhán vagy hajszárítóval)

Garancia:

A talpbetét normál, mindennapos utcai használatra készült. Tartósságát növeli, ha zoknival, harisnyával viselik. Kerüljük, a krémek használatát a lábon amikor a talpbetétet hordjuk, mert ez a betét használhatatlanságához vezet. Az ilyen és ehhez hasonló jellegű és a nem rendeltetésszerű használatból eredő károkért felelősséget, szavatosságot nem vállalunk.

Extrém igénybevételekre (versenysport) nem alkalmas, erre speciális betétek állnak rendelkezésre.

A termékre a rendeltetésszerű használat mellett 6 hónap szavatosságot biztosítunk.

Az SPM FOOT Kft. által gyártott SPM talpbetétek megfelelnek a 93/42/EEC direktívát honosító az orvostechnikai eszközökről szóló 4/2009. (III.17) EÜM rendelet 1. számú mellékletében foglalt – és rá vonatkozatható – alapvető követelményeknek, és rendelkeznek a gyártó szándéka szerinti teljesítőképességgel. Rendeltetésszerű használat esetén nem veszélyeztetik a beteg, a kezelő vagy más személy egészségét, illetve biztonságát

Az SPM talpbetét kizárólag annak a személynek a használatára készült, akit a jelen használati útmutató túloldalán megneveztek a talp nyomáspont műszeres mérésekor. A gyártási azonosítószám a túloldalon szereplő mértvételi lapon és a betéten is megtalálható.

A talpbetéttel kapcsolatos bármilyen ügyintézésrel kapcsolatban keresse a méretvételi helyet ahol a talpbetétet megrendelte.

Gyártja: SPM FOOT Kft. (1074 Budapest, Csengery u. 28.)

Talpizom torna letölthető honlapunkról:

www.spm-foot.hu

www.spm-foot.hu | info@spm-foot.hu